



# Vertic Easy




MONTAJE:

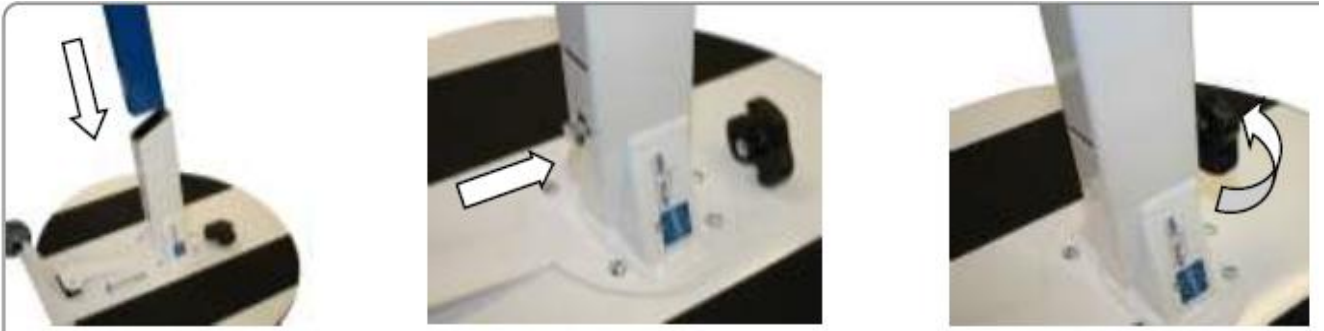

Encaja el mástil en la base y poner la roseta para fijarlo.

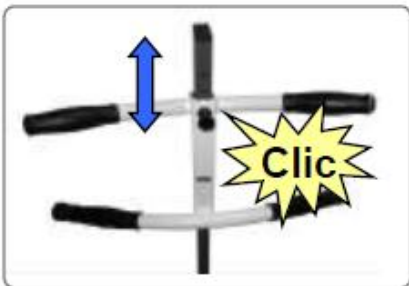

Puños regulables en altura tanto para el paciente como para el cuidador.

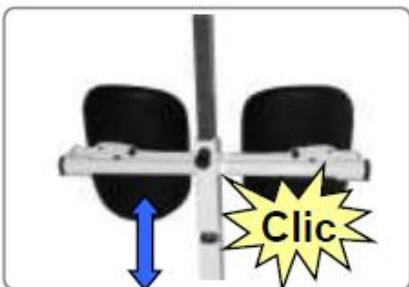

Apoya-piernas regulable en altura para ajustarlo al paciente.



Freno rotación de disco. Para que la maniobra sea segura bloquee con el pie el freno del disco para que no se mueva.



Para desplazar el Vertic Easy inclínelo y desplácelo sobre las ruedas.

**NOTA IMPORTANTE:** Nunca intentar mover el Vertic Easy con el paciente encima.

## USO DEL VERTIC EASY:



- 1.- Coloque el Vertic Easy cerca del paciente de tal manera que apoye los pies en el disco giratorio.
- 2.- Establecer la altura de los puños tanto para el paciente como para el cuidador.
- 3.- Fijar el apoya-piernas.
- 4.- El cuidador tiene que sujetar firmemente de los puños y bloquear el freno con el pie mientras el paciente se levanta sujetándose a los puños.



- 5.- Levantar el pie del bloqueo del freno y girar el disco hasta la posición en la que se le quiere volver a sentar al paciente.



- 6.- Para que el paciente se pueda sentar, el cuidador tiene que volver a sujetar firmemente el Vertic Easy por los puños y bloquear el freno del disco con el pie.

## DESCRIPCIÓN:

**Descriptif**

